 LIMA&PERGHERS/A	FICHA TÉCNICA	Código	FT 237
		Data de elaboração	05/06/2024
		Data de efetivação	05/06/2024
		Revisão	00
		Página	1 de 2

HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% GALENO

FINALIDADE

HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% GALENO é indicado para uso hospitalar e em estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Indicado para a desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos;
- Possui satisfatória ação bactericida frente às cepas *Salmonella choleraesuis*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*;
- Menor custo real por poder e tempo de desinfecção;
- Desinfetante de uso hospitalar;
- Produto biodegradável.

MODO DE USAR

Preparar uma solução na concentração de 1:3 (ou seja, diluir 500 ml de produto em 1500 ml de água).

Para desinfecção de superfícies fixas: Lavar, enxaguar e secar a superfície. Aplicar a solução deixando em contato por 5 minutos. Enxaguar se necessário.

Para desinfecção de artigos não críticos: Lavar, enxaguar e secar os artigos. Imergir os artigos na solução deixando em contato por 5 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível.

Importante: Usar luvas para sua aplicação.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Teor de Cloro: 2,25 - 2,75%

Aparência: Líquido Límpido

Cor: Incolor a Levemente Amarelado

pH (tal qual): 10,5 - 13,5

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO: Hipoclorito de Sódio, estabilizante e veículo.


Princípio ativo: Hipoclorito de Sódio 2,5% p/p.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

PARA CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO MANTENHA O FRASCO PROTEGIDO DO SOL E DO CALOR. Manter o produto em sua embalagem original e bem fechada após o uso.

PRECAUÇÕES

CÓPIA NÃO CONTROLADA - IMPRESSO EM: 5/6/2024
APÓS A DATA DE IMPRESSÃO DESTA DOCUMENTO, O MESMO PODERÁ SER REVISADO.
VERIFIQUE SE ESTA REVISÃO CONTINUA SENDO A ATUAL.

 LIMA & PERGHERS/A	FICHA TÉCNICA	Código	FT 237
		Data de elaboração	05/06/2024
		Data de efetivação	05/06/2024
		Revisão	00
		Página	2 de 2

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração e o contato com os olhos e pele. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remover o paciente para local arejado e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Abra a embalagem cuidadosamente, prevenindo os respingos do produto. Telefone de emergência (CEATOX): 0800 0148 110. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Não reutilizar a embalagem vazia. **"Água: pode faltar. Não desperdice."**

ATENÇÃO: Não aplicar em superfícies metálicas e mármore devido a oxidação causada pelo cloro. Não misturar com outros produtos. A mistura com ácido ou produto à base de amônia produz gás tóxico.

PRAZO DE VALIDADE

06 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

2L e 5L.

REGISTRO

REGISTRO MS: 3.1282.0055.

DADOS DO FABRICANTE

FABRICADO POR: LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

Matriz: CNPJ: 22.685.341/0023-96

Av. Almirante Barroso, 22 - CEP: 20.031-000 - Rio de Janeiro - RJ

Unidade Fabril: CNPJ: 22.685.341/0023-96

Av. Airton Borges da Silva, 740 - CEP: 38.402-100 - Uberlândia - MG

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Responsável Técnico: Fábio Pergher CRQ II 02300831

Autorização de funcionamento nº 3.01.282-6

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (34) 3292-6100

sac@startquimica.com.br