


|   |                      |                           |            |
|---|----------------------|---------------------------|------------|
| <br><b>LIMA&amp;PERGHERS/A</b> | <b>FICHA TÉCNICA</b> | <b>Código</b>             | FT 236     |
|   |                      | <b>Data de elaboração</b> | 01/06/2024 |
|   |                      | <b>Data de efetivação</b> | 01/06/2024 |
|   |                      | <b>Revisão</b>            | 00         |
|   |                      | <b>Página</b>             | 1 de 2     |

## HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% START

### FINALIDADE

**HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% START** é um desinfetante bactericida indicado para uso hospitalar e em estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde.

### VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Indicado para a desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos;
- Possui satisfatória ação bactericida frente às cepas *Salmonella choleraesuis*, *Staphylococcus aureus* e *Pseudomonas aeruginosa*.
- Menor custo real por poder e tempo de desinfecção;
- Desinfetante de uso hospitalar;
- Produto biodegradável.

### MODO DE USAR

**Produto pronto uso. Para desinfecção de superfícies fixas:** Lavar, enxaguar e secar a superfície. Aplicar o produto puro deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar se necessário.

**Para desinfecção de artigos não críticos:** Lavar, enxaguar e secar os artigos. Imergir os artigos no produto puro deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível.

| ÁREAS             | DILUIÇÃO          | TEMPO DE CONTATO |
|-------------------|-------------------|------------------|
| Superfícies fixas | Puro (10.000 ppm) | 10 minutos       |

**ATENÇÃO:** NÃO UTILIZAR EM SUPERFÍCIES METÁLICAS E MÁRMORES DEVIDO A OXIDAÇÃO CAUSADA PELO CLORO. NÃO MISTURAR COM OUTROS PRODUTOS. A MISTURA COM ÁCIDOS OU PRODUTOS À BASE DE AMÔNIA PRODUZ GASES TÓXICOS. NÃO UTILIZAR PARA A DESINFECÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ALIMENTOS. ÁGUA: PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.


### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

**Teor de Cloro:** 0,85 - 1,15%  
**Aparência:** Líquido Límpido  
**Cor:** Incolor a Levemente Amarelado  
**pH (tal qual):** 10,5 - 13,5

### COMPOSIÇÃO

Hipoclorito de Sódio, Estabilizante e Veículo.

**Princípio ativo:** Hipoclorito de Sódio 1% p/p de cloro ativo

|   |                      |                           |            |
|---|----------------------|---------------------------|------------|
| <br><b>LIMA &amp; PERGHERS/A</b> | <b>FICHA TÉCNICA</b> | <b>Código</b>             | FT 236     |
|   |                      | <b>Data de elaboração</b> | 01/06/2024 |
|   |                      | <b>Data de efetivação</b> | 01/06/2024 |
|   |                      | <b>Revisão</b>            | 00         |
|   |                      | <b>Página</b>             | 2 de 2     |

## **CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM**

---

**PARA CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO MANTENHA O FRASCO PROTEGIDO DO SOL E DO CALOR.** Manter o produto em sua embalagem original e bem fechada após o uso. Não reutilizar as embalagens.

## **PRECAUÇÕES**

---

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração e o contato com os olhos e pele. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remover o paciente para local arejado e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Abra a embalagem cuidadosamente, prevenindo os respingos do produto. Telefone de emergência (CEATOX): 0800 0148 110.

## **PRAZO DE VALIDADE**

---

06 meses a partir da data de fabricação.

## **EMBALAGENS DISPONÍVEIS**

---

1L e 5L.

## **REGISTRO**

---

REGISTRO MS: 3.1282.0309.

## **DADOS DO FABRICANTE**

---

FABRICADO POR: LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A  
Matriz: CNPJ: 22.685.341/0023-96  
Av. Almirante Barroso, 22 - CEP: 20.031-000 - Rio de Janeiro - RJ  
Unidade Fabril: CNPJ: 22.685.341/0023-96  
Av. Airton Borges da Silva, 740 - CEP: 38.402-100 - Uberlândia - MG  
INDÚSTRIA BRASILEIRA  
Responsável Técnico: Fábio Pergher CRQ II 02300831  
Autorização de funcionamento nº 3.01.282-6  
SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (34) 3292-6100  
[sac@startquimica.com.br](mailto:sac@startquimica.com.br)